



Anlage von "Laerdal Stifneck SELECT" HWS-Stützkragen

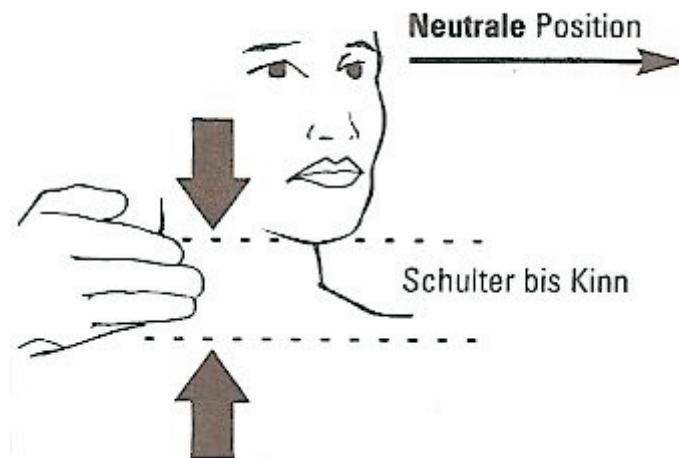


Die Kragengröße am Patienten abmessen

- Kopf mit nach vorne gerichteten Augen in Neutralposition bringen (sofern möglich)
- Gemessen wird der Abstand zwischen Schulteransatz (Schlüsselbein) und Kinnunterkante

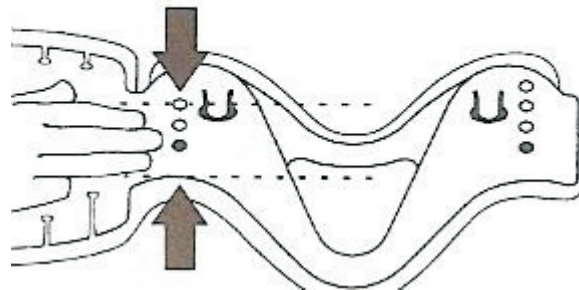

Die passende Kragengröße für den Patienten ermitteln

- Gemessen wird von der harten Kunststoffkante des Kragens (nicht vom Schaumgummi!)

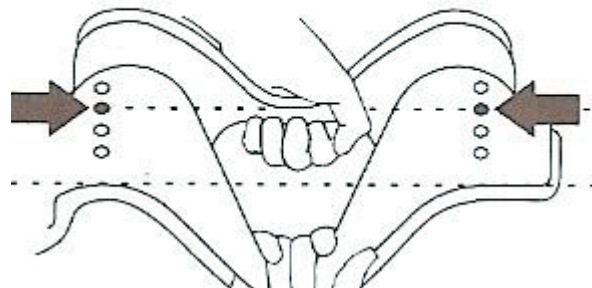


Größe des Kragens einstellen

- Den verstellbaren Kragen durch Ziehen bzw. Drücken auf die entsprechende Größe einstellen

DVR: 0464561 ■ Firmenbuch-Nr.: 88305k ■ UID: ATU 36888702


ÖNORM EN ISO 9002 ■ ÖNORM EN 46002 ■ Zertifikat-Nr.: 98-VNA-AQ-020

Sämtliche von uns gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA entpflichtet; ARA-Lizenznummer: 3123

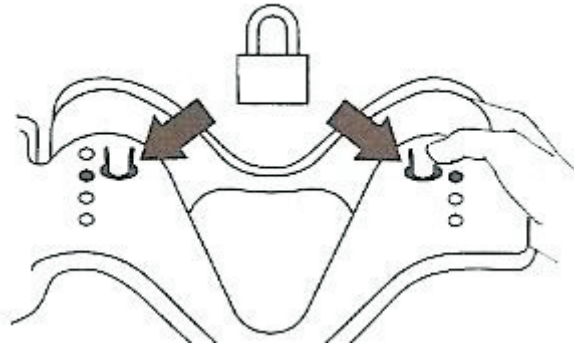


Größe des Kragens fixieren

- Durch Drücken der beiden Verschlusslaschen einrasten (beide Seiten)
- Darauf achten, dass auf beiden Seiten die gleiche Höhe eingestellt und der Kragen gerade ist

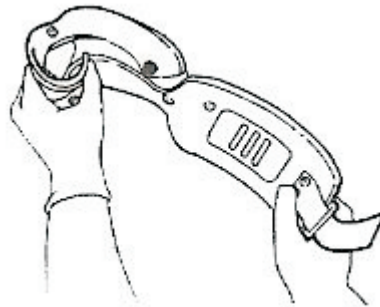

Kragen verformen

- Kragen für den Hals anpassen

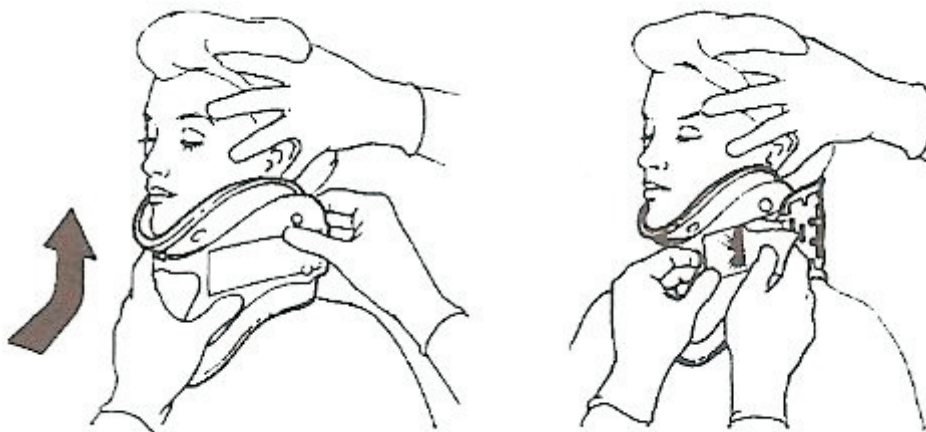

Kragen anlegen und fixieren

- Kinnstütze weit unter das Kinn schieben und Rückseite des Kragens festziehen
- Kragen sorgfältig fest anziehen (die hintere Lasche sollte ein wenig über die vordere ragen)

Bei Nichtpassen Kragen sofort entfernen und neu einstellen!